


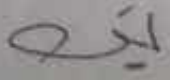
Mellynda Fortius_2110101067

Biokimia

Praktikum 4

A. PRAKTIKUM 4 : Pemeriksaan kejernihan, pH, Glukosa dan protein urin

1. Pemeriksaan urine HCG

	FORMULIR BAGAN ALUR CARA KERJA PRAKTIKUM BIOKIMIA PRODI PROFESI BIDAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS AISYIYA YOGYAKARTA	
	NAMA	MELLYNDA FORTIUS
	NIM	2110101067
	KELAS/KELOMPOK JUDUL PRAKTIKUM	B/B1 Pemeriksaan HCG
ALAT	<ul style="list-style-type: none">> hCG cassette> Pipet tetes	
BAHAN	Sampel: Urine	
DASAR TEORI	Human chorionic gonadotropin (hCG) adalah hormon yang diproduksi oleh plasenta wanita hamil. Di awal kehamilan, tingkat hCG meningkat dalam darah dan dihilangkan dalam urin. Tujuannya, mendeteksi hCG dalam darah atau urin dan mengkonfirmasi atau mengesampingkan kehamilan.	
BAGAN ALUR CARA KERJA	Cara kerja: a) Siapkan HCG cassette dan letakkan di tempat yang bersih dan datar b) Masukkan 3 tetes urine ke dalam sumuran, jangan sampai terbentuk gelembung udara c) Tunggu hasilnya muncul hingga 3- 4 menit d) Hasil positif ditunjukkan dengan adanya 2 garis merah yang muncul pada cassette e) Catat macam dan fungsi reagen yang digunakan dalam tes tersebut	
		Yogyakarta 2021 Menyetujui Dosen Pengampu Praktikum 

2. Penetapan Kejernihan Urin



FORMULIR BAGAN ALUR CARA KERJA PRAKTIKUM
BIOKIMIA PRODI PROFESI BIDAN FAKULTAS ILMU
KESEHATAN UNIVERSITAS AISYIYA YOGYAKARTA

NAMA	MELLYNDA FORTIUS
NIM	2110101067
KELAS/KELOMPOK	B/BI
JUDUL PRAKTIKUM	PENETAPAN KEJERNIHAN URIN

ALAT

1. Pot Urin
2. Tabung Reaksi
3. Rak Tabung
4. Pipet Pasteur

BAHAN

Sampel: Urine sewaktu

DASAR TEORI

Uji kejernihan urine sama seperti uji warna. Nyatakan keadaan urine dengan salah satu dari: jernih, agak keruh, atau sangat keruh. Perlu diperhatikan apakah urine yang dianalisis itu keruh pada saat dikeluarkan atau setelah dibiarkan beberapa lama. Tidak semua macam kekeruhan menunjukkan sifat abnormal. Urine yang normalpun akan keruh jika dibiarkan atau didinginkan, kekeruhan ringan itu disebut nubecula dan terjadi dari lendir, sel-sel epitel dan leukosit yang lambat laun mengendap.

Sebab-sebab urine menjadi keruh

1. Bila urine keruh sejak awal ditampung, kemungkinan adanya fosfat yang cukup banyak (dari konsumsi makanan), adanya bakteri, sel-sel epitel atau sel eritrosit dan leukosit, chylus yang berasal dari adanya butir-butir lemak atau adanya zat-zat koloidal lain.
2. Bila urine menjadi keruh setelah didiamkan, kemungkinan adanya nubecula, urat-urat amorf, fosfat-fosfat amorf, adanya bakteri yang bukan berasal dari dalam badan namun terdapat pada botol penampung.

Tujuan : Untuk mengetahui kejernihan urin

BAGAN ALUR CARA KERJA

Cara kerja:

1. Disiapkan alat dan bahan
2. Dimasukkan urin kedalam tabung reaksi kurang lebih 3/4 bagian tabung
3. Diamati dengan cahaya tembus dengan posisi tabung miring
4. Dicatat hasilnya.

↓ Nilai Normal : Jernih

↓ Pelaporan :

1. Jernih


2. Agak Keruh

3. Keruh


4. Sangat Keruh

Yogyakarta 2021

Menyetujui
Dosen Pengampu Praktikum

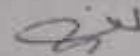

3. Penetapan Derajat Keasaman Urin (Ph) Urine

	FORMULIR BAGAN ALUR CARA KERJA PRAKTIKUM BLOK BIAKIMIA PRODI PROFESI BIDAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS AISYIYAH YOGYAKARTA	
	NAMA	MELLYNDA FORTIUS
	NIM	2110101067
	KELAS/KELOMPOK	B/BI
	JUDUL PRAKTIKUM	PEMERIKSAAN PH URINE
ALAT	Alat dan Bahan : 1. Pot Urin 2. Tabung Reaksi 3. Rak Tabung 4. Kertas Lakmus/ Kertas Universal Indikator	
BAHAN	Sampel : Urin Sewaktu	
DASAR TEORI	<p>Ginjal dan jantung adalah dua organ utama yang mengatur keseimbangan asam dalam tubuh. Jantung mengeluarkan karbondioksida. Sementara ginjal mengatur pengeluaran asam yang tidak mudah menguap yang dihasilkan oleh proses metabolisme normal dari jaringan-jaringan. Keasaman urin utamanya berkaitan dengan asam pospat, dengan hanya sedikit bagian yang dikontribusikan oleh asam-asam organik seperti asam pyruvic, asam lactic dan asam citric. Asam-asam ini dikeluarkan pada urin sebagai garam, sodium, potassium, kalsium dan ammonium. Ginjal mengatur pengeluaran berbagai cations untuk memelihara keseimbangan asam normal. Hal ini dilakukan melalui penyerapan kembali sejumlah ion sodium oleh tubulus dan seiring dengan pengeluaran tubular akan hydrogen dan ammonium dalam pertukaran. Urin makin bertambah meningkatkan asam karena jumlah sodium disimpan oleh peningkatan tubuh.</p> <p>Tujuan : Untuk mengetahui derajat keasaman urin</p>	
BAGAN ALUR CARA KERJA	Cara Kerja : 1. Disiapkan alat dan bahan. 2. Diambil sebuah kertas universal indicator/ kertas lakmus. Kemudian dicelupkan kedalam urine sampai tanda batas yang ditentukan pada kertas. 3. Dibandingkan warna yang terbentuk dengan warna standart (Kertas Universal). 4. Diamati adanya perubahan warna yang terjadi pada kertas lakmus. 5. Dicatat Hasilnya. <ul style="list-style-type: none"> • Interpretasi Hasil : 1. Kertas Lakmus Merah menjadi Biru : Urin bereaksi basa 	

2. Kertas Lakmus Biru menjadi Merah : Urin bereaksi asam
3. Kertas Lakmus Merah tetap Merah : Urin bereaksi asam
4. Kertas Lakmus Biru tetap Biru : Urin bereaksi basa


↳ Nilai Normal : 4,5 - 8,5


Yogyakarta.....2021

Menyetujui
Dosen Pengampu Praktikum


(.....)

4. Pemeriksaan Urine Reduksi (Glukosa Urine)

	FORMULIR BAGAN ALUR CARA KERJA PRAKTIKUM BIOKIMIA PRODI PROFESI BIDAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS AISYIYA YOGYAKARTA	
	NAMA	MELLYNDA FORTIUS
	NIM	2110101067
	KELAS/KELOMPOK	B/B1
	JUDUL PRAKTIKUM	PEMERIKSAAN URINE REDUKSI (GLUKOSA URINE)
ALAT	<ol style="list-style-type: none">1. 1 Tabung reaksi2. Penjepit tabung reaksi3. Rak tabung4. Pipet tetes5. Corong6. Pipet volume7. Lampu spiritus/ bunsen8. Beker glass	
BAHAN	<ul style="list-style-type: none">➤ 5 cc larutan benedict➤ Urine patologis	
DASAR TEORI	Tujuan : Untuk mengetahui adanya glukosa di dalam urin Dasar : Glukosa mempunyai sifat mereduksi. Ion cupri direduksi	

	<p>menjadi cawan dan mengendap dalam bentuk merah bata. Semua larutan sakar yang mempunyai gugusan aldehid atau keton bebas akan memberikan reaksi positif. Na sitrat dan Na karbonat (basa yang tidak begitu kuat) berguna untuk mencegah pengendapan Cu_2O. Sukrosa memberikan reaksi negative karena tidak mempunyai gugusan aktif (aldehid/keton bebas). Reaksi benedict sensitif karena larutan sakar dalam jumlah sedikit menyebabkan perubahan warna dari seluruh larutan, sedikit menyebabkan perubahan warna dari seluruh larutan, hingga praktis lebih mudah mengamatinya. Hasil terlihat sedikit endapan pada dasar tabung. Uji benedict lebih peka karena benedict dapat dipakai untuk menafsir kadar glukosa secara kasar, karena dengan berbagai kadar glukosa memberikan warna yang berlainan</p>
<p>BAGAN ALUR CARA KERJA</p>	<p>Cara Kerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masukkan larutan benedict ke dalam tabung reaksi sebanyak 5 c 2. Campurkan urin patologis 5 - 8 tetes ke dalam tabung yang telah berisi benedict 3. Panaskan tabung di atas spritus/Bunsen dan sambil dikocok perlahan sampai mendidih 4. Dinginkan dan amati terjadi perubahan warna atau tidak <p>➡ Cara menilai hasil :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Negatif (-) : Tetap biru atau sedikit kehijau-hijauan • Positif (+) : Hijau kekuning-kuningan dan keruh (0,5-1% glukosa) • Positif (++) : Kuning keruh (1-1,5% glukosa) • Positif (+++) : Jingga atau warna lumpur keruh (2-3,5% glukosa) • Positif (++++): Merah keruh (> dari 3,5% glukosa)
	<p style="text-align: right;">Yogyakarta..... 2021 Menyetujui Dosen Pengampu Praktikum </p>

5. Pemeriksaan Protein Urine

	FORMULIR BAGAN ALUR CARA KERJA PRAKTIKUM BIOKIMIA PRODI PROFESI BIDAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS 'AISYIYA YOGYAKARTA	
	NAMA	MELLYNDA FORTIUS
	NIM	2110101067
	KELAS/KELOMPOK	B/B1

	JUDUL PRAKTIKUM	PEMERIKSAAN PROTEIN URINE
ALAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 Tabung reaksi 2. Penjepit tabung reaksi 3. Rak tabung 4. Pipet tetes 5. Corong 6. Pipet volume 7. Lampu spiritus/ bunsen 8. Beker glass 	
BAHAN	<ul style="list-style-type: none"> ↳ Asam Asetat 6% ↳ Urin patologis 	
DASAR TEORI	<p>Protein adalah sumber asam amino yang mengandung unsur C,H,O dan N. Protein sangat penting sebagai sumber asam amino yang digunakan untuk membangun struktur tubuh. Selain itu protein juga bisa digunakan sebagai sumber energi bila terjadi defisiensi energi dari karbohidrat dan/atau lemak. Sifat-sifat protein beraneka ragam, dituangkan dalam berbagai sifatnya saat bereaksi dengan air, beberapa reagen dengan pemanasan serta beberapa perlakuan lainnya Urin terdiri dari air dengan bahan terlarut berupa sisa metabolisme (seperti urea), garam terlarut, dan materi organik. Cairan dan materi pembentuk urin berasal dari darah atau cairan interstisial. Komposisi urin berubah sepanjang proses reabsorpsi. Biasanya, hanya sebagian kecil protein plasma disaring di glomerulus yang diserap oleh tubulus ginjal dan diekskresikan ke dalam urin. Normal ekskresi protein biasanya tidak melebihi 150 mg/24 jam atau 10 mg/dl urin. Lebih dari 10 mg/dl didefinisikan sebagai proteinuria. Adanya protein dalam urine disebut proteinuria.</p> <p>Beberapa keadaan yang dapat menyebabkan proteinuria adalah : penyakit ginjal (glomerulonefritis, nefropati karena diabetes, pielonefritis, nefrosis lipoid), demam, hipertensi, multiple myeloma, keracunan kehamilan (pre-eklampsia, eklampsia), infeksi saluran kemih (urinary tract infection). Proteinuria juga dapat dijumpai pada orang sehat setelah kerja jasmani, urine yang pekat atau stress karena emosi. Untuk mengetahui adanya protein di dalam urin dilakukan pemeriksaan. Prinsip dari pemeriksaan ini terjadi endapan urine jika direaksikan dengan asam sulfosalisilat.</p> <p>Tojuan : Untuk mengetahui adanya protein didalam urine</p>	

**BAGAN ALUR CARA
KERJA**

Cara Kerja:

1. Isi urine normal pada tabung 1 dan urin patologi pada tabung 2 hingga dua per tiga tabung
2. Kedua tabung di miringkan, panaskan bagian atas urin sampai mendidih
3. Perhatikan apakah terjadi kekeruhan dibagian atas urin tersebut dengan cara membandingkan dengan urin bagian bawah.
4. Jika urine dalam tabung tidak terjadi kekeruhan maka hasilnya negatif
5. jika urin dalam tabung terjadi kekeruhan maka tambahkan asam asetat 6% sebanyak 3-5 tetes.
6. Panaskan lagi sampai mendidih. Jika urine kembali bening/kekeruhan menghilang maka hasilnya negatif. Jika kekeruhan urin tetap ada maka hasilnya positif.

➤ Cara menilai hasil:

1. Negatif : tidak ada kekeruhan
2. Positif + : kekeruhan ringan tanpa butiran protein)
3. Positif ++ : kekeruhan mudah dilihat dan dengan butiran (0,05-0,2% protein)
4. Positif +++ : Urin jelas keruh dan kekeruhan dengan kepingan (0,2-0,5 % protein)
5. Positif ++++ : Urin sangat keruh dan kekeruhan dengan gumpalan (> dari 0,5 %)

Yogyakarta.....2021

Menyetujui
Dosen Pengampu Praktikum

