



**FORMULIR BAGAN ALUR CARA KERJA PRAKTIKUM  
BIOKIMIA PRODI PROFESI BIDAN FAKULTAS ILMU  
KESEHATAN UNIVERSITAS 'AISYIYA YOGYAKARTA**

<b>NAMA</b>	Shalihati Al Hazi
<b>NIM</b>	2110101088
<b>KELAS/KELOMPOK</b>	B / B2
<b>JUDUL PRAKTIKUM</b>	Pemeriksaan HbsAg

**ALAT**  
Obyek glass, mikroskop, mikro pipet, stopwatch, pengaduk, spuit 3cc, tornvikwet, tabung EDTA, alcohol swab, benguak dan bau instrument kecil, alat sentrifuse.

**BAHAN**  
Serum plasma, Rapid test HbsAg, kit reagen VOR L.

**DASAR TEORI**  
Tes HbsAg adalah tes yang dilakukan sebagai salah satu cara untuk mendeteksi penyakit hepatitis B. Jika hasil tes menunjukkan hasil positif, hal tersebut menandakan bahwa virus hepatitis B terdeteksi di dalam tubuh anda.

**BAGAN ALUR CARA KERJA**

- Bawa kemasan pada suhu kamar sebelum dibuka.
- Dengan panah menunjuk ke arah specimen plasma atau serum. celupkan tes strip secara vertikal pada serum atau plasma setidaknya selama 10-15 detik. Jangan melewati garis batas maksimum (Max) pada tes strip.
- Tempatkan tes strip pada permukaan datar yang tidak dapat menyerap, mulai hitung waktu dan tunggu sampai garis merah muncul. Hasilnya harus dibaca pada 15 menit.

Yogyakarta...66...Desember...2021

Menyetujui  
Dosen Pengampu Praktikum

(.....)



**FORMULIR BAGAN ALUR CARA KERJA PRAKTIKUM  
BIOKIMIA PRODI PROFESI BIDAN FAKULTAS ILMU  
KESEHATAN UNIVERSITAS 'AISYIYA YOGYAKARTA**

<b>NAMA</b>	Shalihati Al Izzati
<b>NIM</b>	2110101088
<b>KELAS/KELOMPOK</b>	B / B2
<b>JUDUL PRAKTIKUM</b>	Pemeriksaan HIV

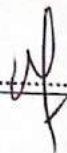
<b>ALAT</b>	Obyek glass, mikroskop, miropipet, stopwatch, pengaduk, spuit 3cc, torniuvet, tabung EDTA, alcohol swab, benguak dan bak instrument kecil, alat sentrifuse.
-------------	---

<b>BAHAN</b>	Serum plasma, Rapid test HIV
--------------	------------------------------

<b>DASAR TEORI</b>	Tes HIV digunakan untuk mendeteksi kehadiran HIV pada plasma darah, air liur, atau urin. Beberapa uji coba dapat menemukan antibodi HIV, antigen atau RNA. Tes antibodi HIV didesain untuk uji coba diagnostik rutin pada orang dewasa.
--------------------	---

<b>BAGAN ALUR CARA KERJA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Dipipet sampel sebanyak 3ml.</li><li>Ditambah diluent sebanyak 3 tetes.</li><li>Baca hasil dalam 12 menit, jangan baca hasil sesudah 15 menit.</li></ol>
------------------------------	--

Yogyakarta...06...Desember...2021  
Menyetujui  
Dosen Pengampu Praktikum

(..........)