



FORMULIR BAGAN ALUR CARA KERJA PRAKTIKUM
BIOKIMIA PRODI PROFESI BIDAN FAKULTAS ILMU
KESEHATAN UNIVERSITAS 'AISYIYA YOGYAKARTA

NAMA : Nur Annisa Ahla

NIM : 2110101059

KELAS/KELOMPOK : A / A9

JUDUL PRAKTIKUM : pemeriksaan Hb

ALAT

- Haemoglobin meter
- lancet
- strip
- larutan kontrol

BAHAN

- Haemoglobin meter
- lancet
- strip
- larutan kontrol

DASAR TEORI

Point of care Testing (POCT) merupakan pemeriksaan laboratorium atau analisis yang dilakukan secara klinis oleh profesional kesehatan non-laboratorium. Karena POCT dilakukan ditempat pasien berada, hasil dari pemeriksaan dapat diketahui lebih cepat pada sampel serupa yang di kirimkan ke laboratorium. Pemeriksaan ini sangat bermanfaat bagi pasien kritis dan juga untuk mengurangi waktu tunggu pasien.

BAGAN ALUR CARA KERJA

- Bersihkan jari tangan yang akan diambil darahnya dengan kapas yang sudah diben alkohol.
- Tusuk area yang dibersihkan dengan lancet.
- Myalakan haemoglobin meter dan matalkan strip.
- Teteskan darah pada strip.
- Baca berapa nilai haemoglobin anda.
- Catat macam dan fungsi reagen yang digunakan dalam tes tersebut

Yogyakarta, 21 Desember 2021

Menyetujui

Dosen Pengampu Praktikum

(.....)