



**FORMULIR BAGAN ALUR CARA KERJA PRAKTIKUM
BIOKIMIA PRODI PROFESI BIDAN FAKULTAS ILMU
KESEHATAN UNIVERSITAS 'AISYIYA YOGYAKARTA**

	NAMA LAILA OKTAVIYANA NIM 2110101084 KELAS/KELOMPOK B/2 JUDUL PRAKTIKUM PEMERIKSAAN GULA DARAH
ALAT	Lancet, glukosameter
BAHAN	sample whole blood (darah kapiler), Jarum, strip, kapas, alkohol, handscoen, wadah limbah infeksi.
DASAR TEORI	<p>POCT (Point Of Care Testing) didefinisikan sebagai Pemeriksaan yang hasilnya dapat diketahui sesegera mungkin dalam membantu menentukan tindakan selanjutnya bagi Pasien. Salah satunya adalah gluksosameter. penggunaan alat gluksosameter yang utama adalah untuk monitoring dan bukan untuk diagnosa pasti karena terdapat beberapa limitasi dari gluksosameter yakni hanya dapat menggunakan sample darah kapiler. penggunaan darah kapiler memiliki kontraindikasi seperti pada kasus penggunaan sirkulasi perifer yang berat misalnya dehidrasi pada koma ketoacidosis, hipotensi berat, gagal Jantung dll. 70-130 (gula darah normal), <u>pranalitik</u></p> <ul style="list-style-type: none">a. persiapan pasienb. persiapan samplec. metode tes : metode enzimatik —> oksidase & hexokinased. Prinsip tes

BAGAN ALUR CARA KERJA

- 1). Siapkan alat glukosameter
- 2). Jarum dimasukan dalam lancet dan dipilih Pada nomor lancet sesuai dengan ketebalan kulit pasien.
- 3). Chip khusus untuk pemeriksaan glukosa dimasukan dalam alat glukosameter Pada tempatnya.
- 4). masukan strip pada tempatnya.
- 5). Salah satu jari pasien dibersihkan dengan alkohol.
- 6). Darah kapiler diambil menggunakan lancet.
- 7). masukan sampel darah kapiler kedalam strip.
- 8). hasil Pengukuran akan ditampilkan pada layar strip. & cabut strip.
- 9). Jarum dibuang dari lancet.

Yogyakarta.29..Desember.2021

Menyetujui

Dosen Pengampu Praktikum

(.....) 