



**FORMULIR BAGAN ALUR CARA KERJA PRAKTIKUM  
BIOKIMIA PRODI PROFESI BIDAN FAKULTAS ILMU  
KESEHATAN UNIVERSITAS 'AISYIYA YOGYAKARTA**

	<b>NAMA</b> Selina Agustin siswandi
	<b>NIM</b> 2110101130
	<b>KELAS/KELOMPOK</b> B / B5
	<b>JUDUL PRAKTIKUM</b> Pemeriksaan Hb
<b>ALAT</b>	Hemoglobin meter, lancet, strip, pipet tetes, tabung sahli, batang Pengaduk, pipet sahli, <del>aspirator aspirator</del> , Spuid
<b>BAHAN</b>	HCl 0,1 M, Sample hemoglobin, aquadest, lantau control
<b>DASAR TEORI</b>	<p>Hemoglobin adalah metaloprotein pengangkut Oksigen yang mengangkut Oksigen dalam sel darah merah mamalia dan hewan lainnya. Molekul hemoglobin terdiri dari: globin, apoprotein, dan empat gugus heme, suatu molekul organik dengan satu atom besi.</p> <p>Point Of Care Testing (PoCT) merupakan pemeriksaan laboratorium atau analisis yang dilakukan secara klinis oleh profesional kesehatan non-laboratorium. Karena PoCT dilakukan di tempat pasien berada, hasil dari pemeriksaan dapat diketahui lebih cepat dari pada sampel serupa yang dilirikkan ke laboratorium. Pemeriksaan ini sangat bermanfaat bagi pasien kritis dan juga untuk mengurangi waktu tunggu pasien. Namun Poct memiliki ketidak akuratan dibandingkan dengan pengujian laboratorium, yaitu hasilnya tidak seakurat hasil pemeriksaan laboratorium. Selain itu biaya tes yang dilakukan dengan PoCT lebih besar dari pada pengujian laboratorium konvensional. Lebih dari 40% hamil (1 strip 0,2 gram per sen)</p>

BAGAN ALUR CARA KERJA

- a) Bersihkan dari tangan yang akan diambil darahnya dengan kapas yang sudah basi alkohol
- b) Tusuk area yang dibersihkan dengan lancet
- c) Nyalakan haemoglobin meter dan masukan strip
- d) Teteskan darah pada strip
- e) Baca beberapa nilai haemoglobin anda.
- f) Catat macam dan fungsi reagen yang digunakan dalam tes tersebut.
- g) Sedot darah dengan pipet sahli, masukan kedalam tabung sahli yang sudah diisi HCl 0;1M, setelah itu teteskan aquadest sampai warnanya sama.

Yogyakarta 20, Desember 2021

Menyetujui  
Dosen Pengampu Praktikum

rl

(... Rosmita Huzuliana S.SiT, M.Ked)



FORMULIR BAGAN ALUR CARA KERJA PRAKTIKUM  
BIOKIMIA PRODI PROFESI BIDAN FAKULTAS ILMU  
KESEHATAN UNIVERSITAS 'AISYIYA YOGYAKARTA

NAMA	Selina Agustin fawandi
NIM	210101130
KELAS/KELOMPOK	B (B5)
JUDUL PRAKTIKUM	Pemeriksaan Gula Darah
ALAT	Lancet, Alat glukosameter, Jarum, Handschoen, Wadah limbah <del>infeksius</del> Infektius, <del>lancet</del>
BAHAN	Sampel Whole blood (darah kapiler), Strip, kemasan alkohol
DASAR TEORI	Gula darah sewaktu adalah pemeriksaan untuk mendetect kadar glukosa darah secara spontan, yang bisa dilakukan kapan saja. Selain <del>waktu</del> sewaktu, biasanya ada pemeriksaan gula darah puasa dan dua jam setelah makan. Ketiga pemeriksaan gula darah tersebut akan memberikan hasil yang berbeda, dan nilai <del>nya</del> masing-masing juga berbeda. Pemeriksaan gula darah sewaktu dapat dilakukan secara bebas oleh siapa saja. Pada orang sehat, dapat dilakukan screening secara rutin setiap 6 bulan. Hal ini penting untuk mendetect penyakit diri, diabetes sehingga jika ada gejala khas penyakit tersebut, dapat ditangani dengan segera. Poct (Point Of care Testing) dideskripsikan sebagai pemeriksaan yang hasilnya dapat diketahui sesegera mungkin dalam membantu menentukan tindakan selanjutnya bagi pasien. Salah satu contohnya ialah glukosameter. Penggunaan alat glukosameter yang utama ialah untuk monitoring darah untuk diagnosis pasien karena terdapat beberapa limitasi dari glukosameter yakni hanya dapat menggunakan sampel darah kapiler.

normalnya: dibawah 176

tidak normal : ~~lebih~~ 200

BAGAN ALUR CARA KERJA

- a. alat glukosameter diambil
- b. Jannum dimantikan dalam lancet dan pilih depilasi nomor pada lancet sesuai ketebalan kulit patien
- c. Chip khusus untuk pemeriksaan glukosa dimasukkan pada alat glukosameter pada tempatnya (sesuai alat glukosameter)
- d. Strip dimasukkan pada tempatnya (sesuai alat glukosameter)
- e. Jari ke-2/ke-3/ke-4 patien dibersihkan dengan menggunakan kapas alcohol lalu dibiarkan mengering
- f. Darah kapiler diambil dengan menggunakan lancet yang diburuk pada jari ke-2 (ke-3 / ke-4) patien
- g. Sampai darah kapiler dimantikan kedalam strip dengan cara ditampelkan pada bagian khusus pada strip yang menyapu darah
- h. Hasil pengukuran kadar glukosa akan ditampilkan pada layar strip dicabut dari alat glukosa meter
- i. Jannum dibuang dari lancet

Yogyakarta.....20 desember.....2021  
Menyetujui  
Dosen Pengampu Praktikum

(Rozmita Huzuliana S.Si.T., M.Keb.)