



**FORMULIR BAGAN ALUR CARA KERJA PRAKTIKUM  
BIOKIMIA PRODI PROFESI BIDAN FAKULTAS ILMU  
KESEHATAN UNIVERSITAS 'AISYIYA YOGYAKARTA**

<b>NAMA</b>	<b>FITRIANA ARDIANSAH</b>
<b>NIM</b>	<b>2110101107</b>
<b>KELAS/KELOMPOK</b>	<b>B3</b>
<b>JUDUL PRAKTIKUM</b>	<b>PEMERIKSAAN GLUKOSA DARAH</b>

<b>ALAT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lancet</li> <li>2. Alat glukosameter</li> </ol>
<b>BAHAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sampel whole blood (darah kapiler)</li> <li>2. Jarum</li> <li>3. Strip</li> <li>4. Kapas alkohol</li> <li>5. Handschoen</li> <li>6. Wadah limbah infeksius</li> </ol>
<b>DASAR TEORI</b>	<p>POCT (Point of care Testing ) didefinisikan sebagai pemeriksaan yang hasilnya dapat diketahui sesegera mungkin dalam membantu menentukan tindakan selanjutnya bagi pasien. Salah satu contohnya ialah glukosameter. Penggunaan alat glukosameter yang utama ialah untuk monitoring dan bukan untuk diagnosa pasti karena terdapat beberapa limitasi dari glukosameter yakni hanya dapat menggunakan sampel darah kapiler. Penggunaan darah kapiler memiliki beberapa kontraindikasi seperti pada kasus gangguan sirkulasi perifer yang berat misalnya dehidrasi pada koma ketoasidosis, hipotensi berat, gagal jantung, dan lain-lain.</p>
<b>BAGAN ALUR CARA KERJA</b>	<p>Cara Kerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Alat glukosameter disiapkan</li> <li>b. Jarum dimasukkan dalam lancet dan dipilih nomor pada lancet sesuai ketebalan kulit pasien</li> <li>c. Chip khusus untuk pemeriksaan glukosa dimasukkan pada alat glukosameter pada tempatnya (sesuai alat glukosameter)</li> <li>d. Strip dimasukkan pada tempatnya (sesuai alat glukosameter)</li> <li>e. Jari kedua/ketiga/keempat pasien dibersihkan dengan menggunakan kapas alkohol lalu dibiarkan mengering</li> <li>f. Darah kapiler diambil dengan menggunakan lancet yang ditusuk pada jari kedua/ketiga/keempat pasien</li> <li>g. Sampel darah kapiler dimasukkan ke dalam strip dengan cara ditempelkan pada bagian khusus pada strip yang meyreap darah</li> </ol>

h. Hasil pengukuran kadar glukosa akan ditampilkan pada layar - Strip  
dicabut dari alat  
Glukosa meter  
i. Jarum dibuang dari lancet

Yogyakarta.....2021  
Menyetujui  
Dosen Pengampu Praktikum  
  
(.....)