

BAGAN ALUR CARA
KERJA

- Alat glukosameter di siapkan
- Jarum dimasukkan dlm lancet dan di pilih nomor Rd lancet sesuai ketebalan kulit pasien
- chip khusus untuk pemeriksaan ~~glukosa~~ glukosa dimasukkan Rd alat glukosameter Rd tempatnya
- Jari kedua / ketiga / keempat pasien di bersihkan dg menggunakan kapas alkohol lalu ~~dibersihkan~~ dibersihkan mengering
- darah kapiler diambil dg menggunakan lancet yg ditutup Rd jari kedua / ketiga / keempat pasien
- Sampel darah kapiler dimasukkan ke dlm strip dg cara ditempatkan Rd bagian khusus Rd strip yg menyerap darah

- hasil pengukuran kadar glukosa akan ditampilkan, Yogyakarta, 07 desember 2021
Pada layar
- Jarum dituang dari lancet.

Menyetujui
Dosen pengampu praktikum



FORMULIR BAGAN ALUR CARA KERJA
PRAKTIKUM BOKIMIA PRODI PROFESI BIDAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN 'AISYIYAH
YOGYAKARTA

	NAMA	Lia Agusmanina
	NIM	2110101034
	KELAS/KELOMPOK	A3
	JUDUL PRAKTIKUM	Glukosa darah
ALAT	Lancet Alat glukosameter	
BAHAN	Sampel whole blood Jarum Strip Kapas alkohol handschoen wadah limbah infeksius	
DASAR TEORI	POCT didefinisikan sbg pemeriksaan diim membantu menentukan tindakan selanjutnya bagi pasien.	

daerah Sehatku, normal 100
-11- kuasa (8 jam), normal 70-100